

# Diapouch™ - Käyttöohje.



Kuva I



Kuva II

## Käyttöohje:

1. Vedä pakkaus auki toisesta reunasta.
  2. Poista kiinnitysteippi pussista.
  3. Suojaa katetrin juuri oman yksikkösi ohjeiden mukaan. Aseta katetrin lumenet suojapussiin niin, että pussin lyhyempi puoli tulee ihoa vasten ja pidempi puoli peittää katetrin juuren (Kuva I). Voit halutessa si suojata katetrin lumenet sideharsotaitoksella ennen pussiin laittamista.
  4. On suositeltavaa, että pussin pidempi sivu peittää katetrin juuren ja sen mahdolliset suojat kokonaan.
  5. Varmista, että iho katetrin juuren ympärillä on kuiva ennen kiinnitysteipin asettamista.
  6. Vedä kiinnitysteipin suojapaperi pois. Aseta kiinnitysteippi n. 2 cm pussin pidemmän läpän reunojen yli tiiviisti ihoa vasten (Kuva II).
  7. Varmista, että kiinnitysteippi on tiiviisti pussin suuaukon ympärillä, ettei vesi pääse tunkeutumaan pussiin tai katetrin juureen\*.
- DIAPOUCH™ - Vedenpitävän suojapussin ulkomitat: 17 X 8 cm, sisämitat: 13 X 7 cm tai ulkomitat: 19 X 8 cm, sisämitat: 15 X 7 cm
  - KIINNITYSTEIPPI läpäisee ilman. Koko: 10 X 12 cm
- \*HUOM:** Suojapussi on täysin vedenpitävä. Suojapussin pidemmän reunan tulee kuitenkin peittää kauttaaltaan katetrin juuren suojataitokset. Kiinnitysteippi tulee asettaa tasaisesti ilman taitoksia ja sen tulee peittää koko suojapussin pidempi läppä. Varmista, että iho on täysin kuiva teippauksen alla!

## VEDENPITÄVÄ SUOJA KATETRIN LUMENILLE


Steriili, elastinen, pehmeä vedenpitävä pussi suojaa hemodialyysi-/peritoneaalidialyysi-/onkologisia katetrin lumenia, liitoksia ja katetrin juurta. Suojaa katetria ja katetrin juurta\*suihkun aikana kastumiselta.



STERILE EO



L.C.H. 7 rue de Thionville  
75019 Paris France

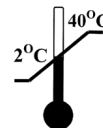

REF: 01143 - 01148