
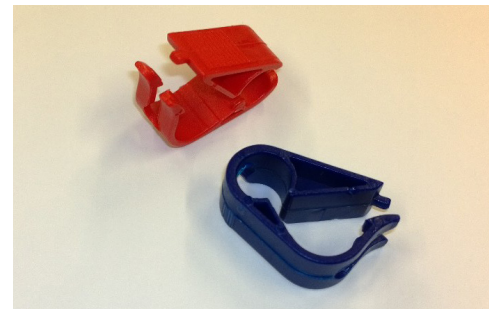


Replacement Clamp


-vaihtosulkija

- Replacement Clamp on vaihtosulkija dialyysikatetreihin.*
- Replacement Clamp:lla korvaat rikki menneet sulkijat ilman, että koko katetria täytyy vaihtaa.
- Jopa katetrien valkoiset tilavuusmerkintä -osat voidaan siirtää Replacement Clamp:n vaihtosulkijoihin.

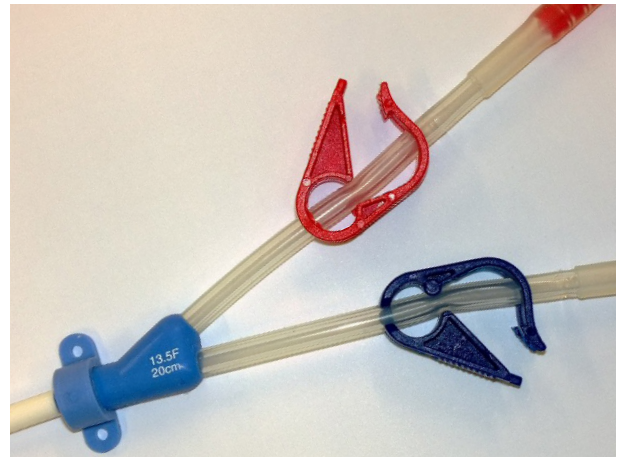

Vaihe 1:

Poista rikkoutunut sulkija ja työnnä Replacement Clamp:n sivusta paikoilleen.

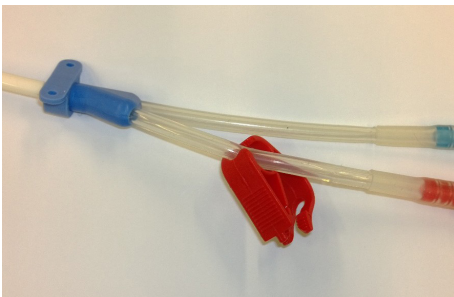

Vaihe 2:

Nosta katetri sulkijan keskellä olevaan uraan. Replacement Clamp on valmis käytettäväksi.



* Replacement Clamp on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Vahingoittunut katetri tulee aina vaihtaa uuteen. Noudata tarkoin katetrinvalmistajan ohjeita.

Tilaustiedot

Tilausnro	Tuote	Pakkaus
RCM03	Replacement Clamp sininen ja punainen	2 kpl