




ASENNUK


Valitse sopivan kokoinen SecurAcath katetrin koon mukaan. Mikäli katetrin koko on puolikas koko, käytä lähimpää pienempää kokoa valitessasi sopiva SecurAcath -laite, esim. katetrin koko on 8,5 Fr, valitse SecurAcath 8 Fr.




- Taivuta ankkurin väkäset yhteen painamalla laite kaksinkerroin.
- Nosta katetria ylöspäin, että katetrin ulostuloaukko tulee näkyviin.

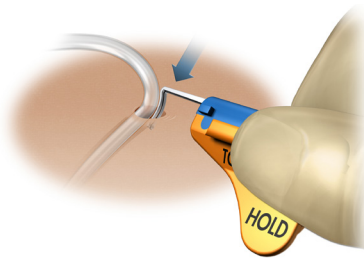


- Pidä ankkuri yhteen painettuna ja vie 30 asteen kulmassa ankkuri katetrin ulostuloaukosta sisälle ihon alle vain sen verran, että ankkuri ei ole näkyvissä.

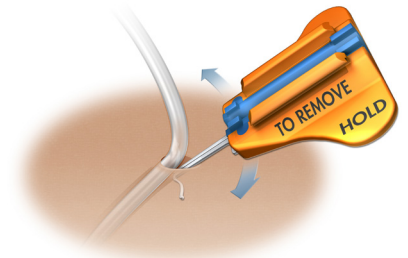


- Vapauta ankkuri, jolloin laite on litteä.
- Vedä SecurAcathia varovasti, jolloin tarkistat, että ankkuri on hyvin auki ja paikallaan ihon alla.

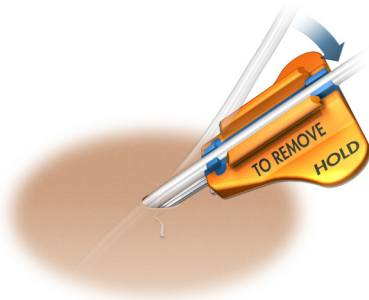

- Sovita katetri SecurAcathin keskellä kulkevaan uraan.
- Varmista, että SecurAcath on puhdas ja kuiva.

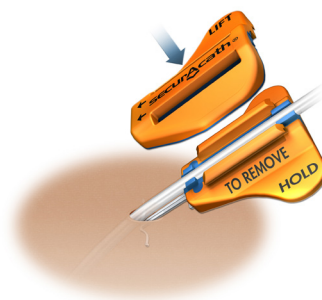

- Aseta SecurAcathin kansi paikoilleen.
- Paina molemmista osista, kunnes kuuluu napsahdus.
- Varmista, että osat ovat huolellisesti kiinnitetty ja tiukasti kiinni.

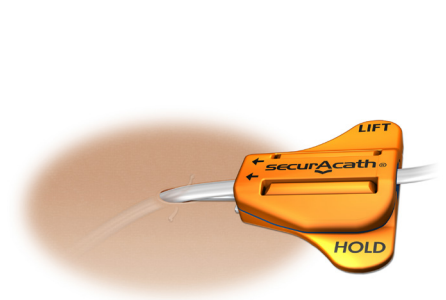

- Katetri on nyt turvallisesti kiinnitetty.
- SecurAcath pysyy litteänä ihoa vasten ja voi olla paikoillaan koko katetrin eliniän ajan.
- Peitä yksikkösi ohjeiden mukaisesti.



<https://youtu.be/IcpCxWcQQCs>



<https://youtu.be/mo2Tx9ZOCQ>





<https://youtu.be/5YQI3uB7tSg>



<https://youtu.be/oVfGhzdlznU>

POISTAMINEN

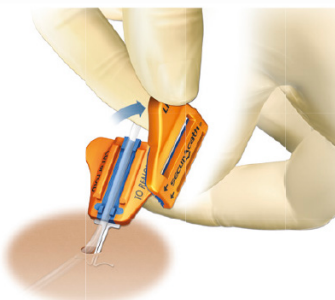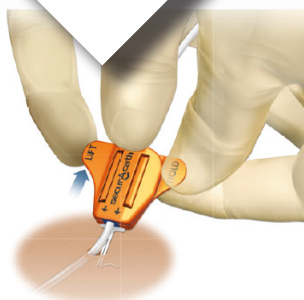


- Tue toisen käden sormella laitteen alapuolelta.
- Toisella kädellä irrota kansi laitteen yläkulmassa olevasta väkäsestä.

- Poista kansi kokonaan ankkuri-osasta.

- Poista katetri - älä käytä liian suurta voimaa.
- Paina katetrin ulostuloaukkoa, kunnes hemostaasi aktivoituu.


Vaihtoehto 1 TAITTAMALLA

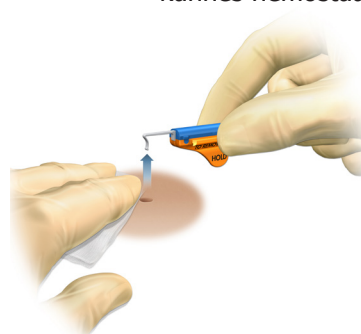

- Taita ankkuriosaa alaspäin kahdella sormella.
- Kolmannella sormella voit auttaa laitteen alapuolelta, että laite taittuu kaksinkertaiseksi.

- Pidä toisella kädellä lähellä ulostuloaukkoa ihoa stabiilina.
- Nosta ankkuri kohtisuoraan ylöspäin katetrin ulostuloaukosta.
- Nopea nykäisevä liike voi olla tarpeellinen poistettaessa ankkuria.

Vaihtoehto 2 LEIKKAAMALLA

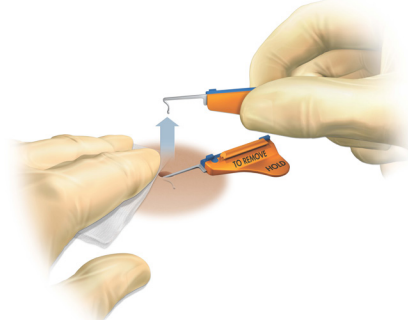

- Käytä tylppiä saksia (Metzenbaum, Mayo tms.) leikataksesi ankkuriosaa keskilinjaa pitkin kahteen osaan.

- Pidä toisella kädellä lähellä ulostuloaukkoa ihoa stabiilina.
- Käytä nopeaa nykäisevää liikettä poistaessasi yksitellen ankkurin osat ulostuloaukosta.
- Joustava ankkurin materiaali suoristuu vedettäessä, joten se ei aiheuta repeämiä tai traumaata alueelle.



https://youtu.be/0fxj_yrrg3E



<https://youtu.be/UwCBqSD6vps>



<https://youtu.be/KDfxw7biYr0>