

StopHemo-H

Verenvuodon tyrehdyttävä vanulevy

Luonnollinen ja edullinen valinta verenvuodon tyrehdyttämiseksi

- StopHemo-H on kalsiumalginaattia, merilevästä (laminaria hyperborea) eristettyä **luonnonkuitua**, joka tyrehdyttää verenvuodon nopeuttamalla veren hyytymistä.
- StopHemo-H -vanulevy imee haavasta erittyvän nesteen, muodostaen haavaa **ulkoiselta lialta suojaavan geelipinnan**.
- Käytetään hemodialyysihoidoissa: hoidon aikana tyrehdyttämään verenvuotoa pistokohdista, ja hoidon lopussa **lyhentämään pistokohtien hyytymisaikaa**.



Tilaustiedot

Tilausnro	Tuote	Pakkaus
SH50	StopHemo-H verenvuodon tyrehdyttäjä	50 kpl

StopHemo-H


Vanulevyn käyttö dialyysissä

Pistoskohdat

Laita StopHemo-H -vanu pistokohdan päälle kevyesti painamalla.
Paina, kunnes verenvuoto on tyrehtynyt.

Yleistä

Kun verenvuoto on lakannut, irrota vanu varovaisesti.
Älä poista vanusta haavaan mahdollisesti tarttuneita kuituja.
Kudokseen jääneet kuidut poistuvat ruven mukana.

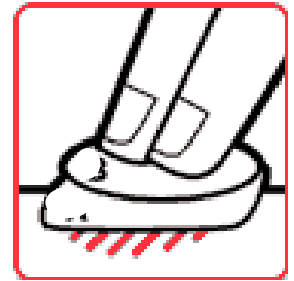

Mitä sivuvaikutuksia StopHemo-H -vanulevyllä on?

Mitään sivuvaikutuksia ei ole todettu.

Huom!

Tuote sisältää pinta-aktiivisia aineita, jotka saattavat aiheuttaa yliherkkyysoireita joillekin herkille potilaille.

Tuoteseloste

SISÄLTÖ

Steriiliä luonnonkuidusta valmistettua vanua. 100% kalsiumalginaattia, joka on eristetty merilevästä (laminaria hyperborea).

PAKKAUS

Steriilejä yksittäin pakattuja vanulevyjä; 50 kpl.
Vanulevyn koko 2 cm x 4 cm. Säilytettävä kuivassa ja huoneenlämmössä.
Käytä aina avaamaton pakkaus. Uudelleensterilointi kielletty.

OMINAISUUDET

Verenvuotoa tyrehtyttävä. Verenvuotoa tyrehtyttävä vaikutus ilmenee, kun vanu pääsee kosketuksiin veren kanssa, jolloin tapahtuu nopeaa ja voimakasta kalsiumionien vapautumista. Lisäksi kuidut muodostavat verkkomaisen rakenteen, joka mahdollistaa ja helpottaa veren hyytymistä (koaguloitumista).

Absorboiva. Märkivän haavan kanssa kosketuksiin joutuessaan kalsiumalginaatin mikrokuidut muodostavat geeliä ja kuituverkon, jotka suojaavat haavaa ulkoiselta liialta ja lämpötilan vaihtelulta.

Haavan paraneminen. Kun kalsiumalginaatin mikrokuidut pääsevät kosketuksiin haavan kanssa, muodostuu geeliä, joka helpottaa luonnollista haavan paranemista.

