

Tego® -turvakorkin vaihtaminen



Tego -turvakorkki on sulkeutuva luer-systeemi, mikä ei tarvitse neulaa. Se on erityisesti suunniteltu käytettäväksi hemodialyysipotilaiden keskuslaskimokatetreissa tai vastaavissa muissa verisuonikatetreissa. Tego -turvakorkki asennetaan keskuslaskimokatetrin lumeneen luer-tekniikalla ja kaikki toimenpiteet voidaan tehdä turvakorkin kautta, mm. katetrinhuuhtelut. Tego -turvakorkin käytössä tulee käyttää aseptista työskentelytapaa ja se voidaan pyyhkiä kaikilla yleisesti potilaskäytössä olevilla desinfiointiaineilla, mm. 70 % isopropyylialkoholilla.*

Tego -turvakorkki on hyväksytty sekä toimivuudeltaan että mikrobiologisilta ominaisuuksiltaan käytettäväksi hemodialyysikatetreissa 7 vuorokauden ajan.* Me suosittelemme kuitenkin, että Tego -turvakorkki vaihdetaan uuteen joka neljännen hemodialyysihoidon alussa aseptista työskentelytekniikkaa käyttäen. Alla olevassa taulukossa kuvataan suositeltu Tego -turvakorkin käyttö yhden viikon aikana.

1. hemodialyysihoito

1. Irrota korkki katetrinlumenesta.
2. Asenna uusi Tego -turvakorkki aseptisesti hemodialyysikatetrin lumeneen luer-liitäntätekniikalla.
3. Asenna tyhjä, ilmaton ruisku Tego -turvakorkin membraanin läpi ja aspiroi katetrinlukko (3-10 ml verta).
4. Huuhtelee hemodialyysikatetrin lumen 10-20 ml NaCl-liuosta, viemällä ruisku Tego -turvakorkin memraanin läpi luer-tekniikkaa käyttäen.
5. Tee hemodialyysikatetrin toiselle lumenelle kohdat 1-4.
6. Yhdistä veriletkut Tego -turvakorkin memraanin läpi luer-tekniikalla. Tarkista, että liitos on tiivis.
7. Hoidon jälkeen irrota veriletkut Tego -turvakorkeista luer-tekniikalla.
8. Huuhtelee lumenet 10-20 ml NaCl-liuoksella.
9. Laita katetrinlukot luer-tekniikalla Tego -turvakorkin memraanin läpi katetrin lumeniin.

2. hemodialyysihoito

1. Desinfioi Tego -turvakorkki pyyhkimällä.
2. Asenna tyhjä, ilmaton ruisku Tego -turvakorkin membraanin läpi ja aspiroi katetrinlukko (3-10 ml verta).
3. Huuhtelee hemodialyysikatetrin lumen 10-20 ml NaCl-liuosta, viemällä ruisku Tego -turvakorkin memraanin läpi luer-tekniikkaa käyttäen.
4. Tee hemodialyysikatetrin toiselle lumenelle kohdat 1-3.
5. Yhdistä veriletkut Tego -turvakorkin memraanin läpi luer-tekniikalla. Tarkista, että liitos on tiivis.
6. Hoidon jälkeen irrota veriletkut Tego -turvakorkeista luer-tekniikalla.
7. Huuhtelee lumenet 10-20 ml NaCl-liuoksella.
8. Laita katetrinlukot luer-tekniikalla Tego -turvakorkin memraanin läpi katetrin lumeniin.

3. hemodialyysihoito

1. Desinfioi Tego -turvakorkki pyyhkimällä.
2. Asenna tyhjä, ilmaton ruisku Tego -turvakorkin membraanin läpi ja aspiroi katetrinlukko (3-10 ml verta).
3. Huuhtelee hemodialyysikatetrin lumen 10-20 ml NaCl-liuosta, viemällä ruisku Tego -turvakorkin memraanin läpi luer-tekniikkaa käyttäen.
4. Tee hemodialyysikatetrin toiselle lumenelle kohdat 1-3.
5. Yhdistä veriletkut Tego -turvakorkin memraanin läpi luer-tekniikalla. Tarkista, että liitos on tiivis.
6. Hoidon jälkeen irrota veriletkut Tego -turvakorkeista luer-tekniikalla.
7. Huuhtelee lumenet 10-20 ml NaCl-liuoksella.
8. Laita katetrinlukot luer-tekniikalla Tego -turvakorkin memraanin läpi katetrin lumeniin.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiinne, koskien Tego -turvakorkkia tai sen käyttöä.

Tego -turvakorkkia käyttämällä vähennetään katetrin lumenen kuormitusta, minimoidaan katetriperäisten infektioiden riskiä sekä parannetaan potilasturvallisuutta (ilmaemboliariski vähenee).

* Microbial Challenge and Disinfection Study for the Tego® Needlefree Hemodialysis Connector
Irvine Analytical Laboratories, Irvine, California USA